

## Руководство по применению

### Брейсы Понсети (ортез голеностопного сустава)



084\_MKT\_Russian\_AFO\_Instructions\_For\_Use\_V001

c-prodirect  
Proud to support the Ponseti method

## Руководство по применению Брейсы Понсети (ортез голеностопного сустава)

- Брейсы Понсети предназначены для применения по методу Понсети согласно указаниям вашего лечащего врача.
- Перед тем, как надевать брейсы, следует убедиться, что ноги ребенка чистые и совершенно сухие.
- Надевайте сандалии с подходящими по размеру носками из гладкого материала с высоким содержанием хлопка, а верхний край носков должен выходить за верхнюю кромку сандалии.
- Надевая сандалии, постарайтесь, чтобы ребенок был спокоен и расслаблен, или даже спал. Надевание брейсов можно легко превратить в часть привычного ритуала при подготовке ко сну.

### Шаг 1

Поместите ногу ребенка в расстегнутую сандалию так, чтобы пряжки ремешков оказались на внутренней стороне стопы.



### Шаг 2

Проверьте положение пятки через отверстие в тыльной части сандалии. Пятка должна быть как можно плотнее прижата к заднику сандалии.



### Шаг 3

Не давая стопе сдвинуться вперед, наложите язычок на перед голени и верх стопы, как на рисунке.



### Шаг 4

Плотно затяните и застегните средний ремешок, чтобы зафиксировать язычок. Отверстие в язычке должно быть видно сразу над ремешком. При необходимости используйте мягкую подкладку.



## Шаг 5

Застегните нижний ремешок (ремешки). Ремешок (-шки) не должен (-жны) быть очень тугим (-ми), старайтесь, чтобы стопа была плоской, а пальчики прямыми.



## Шаг 6

Застегните верхний ремешок, стараясь не перетянуть и не ограничить нормальный приток крови к стопе.



## Шаг 7

Проверьте ширину планки, она должна быть равна ширине плеч. При необходимости отрегулируйте планку, для этого шестигранным ключом открутите два винта в соединителе. Установите соединитель по центру, отрегулируйте длину и слегка подтяните винты так, чтобы планка не смещалась.



## Шаг 8

Проверьте угол отвода стопы (абдукции) на планке. Обычно это 30 градусов, если нет косолапости, и 60 градусов – при косолапости. Однако точное значение должен указать ваш лечащий врач. Чтобы изменить угол, полностью вывинтите из шкалы наружный винт и ослабьте центральный винт, чтобы можно было вращать шкалу. Поверните шкалу на нужный угол, затяните центральный винт и установите на место наружный винт.



## Шаг 9

С помощью быстросъемных креплений присоедините планку к сандалиям. Задвигайте крепление в паз в подошве сандалии, пока оно не защелкнется. При лечении одной ноги сначала присоединяйте планку к сандалии для здоровой ноги.



## Шаг 10

Чтобы снять сандалию, нажмите кнопку на креплении, чтобы расстегнуть каждую сандалию. Далее выполняйте действия в обратном порядке.



## Предупреждения и меры предосторожности

Использовать строго в соответствии с настоящей инструкцией и назначением врача.

Немедленно обратитесь к вашему врачу, если у пациента появятся какие-либо боли, волдыри или раны, или если ортез недостаточно плотно прилегает к ноге пациента (нога проскальзывает в ортезе).

Не сгибайте планку и не давайте ребенку ходить с прикрепленной планкой. Сгибание планки может ухудшить лечебный эффект и привести к поломке во время ношения, что чревато травмой для пациента.

Не перетягивайте регулировочные винты.

Не пользуйтесь брейсами, если какая-либо часть ортеза испорчена или неправильно прилегает к ноге пациента.

Чистите ортезы и планку только теплой водой, стараясь не намочить замшевые части.

Более подробные сведения можно получить на сайте [www.c-prodirect.co.uk](http://www.c-prodirect.co.uk) или в компании C-Pro Direct.

## Гарантия, замена и возврат

Мы стремимся дать всем нашим заказчикам высочайший уровень обслуживания. Если полученное вами изделие имеет дефекты, или если придет не то изделие, которое вы заказали, обратитесь к нам, чтобы мы смогли быстро найти решение.

- Сломанные сандалии (в пределах 6 месяцев носки): Бесплатная замена сандалий при обнаружении производственного дефекта или вызванного нормальной эксплуатацией повреждения любых частей сандалии.
- Сломанные сандалии (свыше 6 месяцев носки): Если поломка или повреждение сандалии вызваны нормальной эксплуатацией дольше 6 месяцев со дня покупки, то мы попросим измерить стопу ребенка, чтобы убедиться, что текущий размер ему все еще подходит. Если текущий размер все еще подходит, вам будет предоставлена бесплатная замена.
- Поломка планки, крепления, набойки или шайбы: Бесплатная замена в случае поломки или повреждения планки или любых ее деталей при нормальной эксплуатации в соответствии с настоящей инструкцией. Примечание: Изделие предназначено для ношения только во время дневного или ночного сна. Ходьба в брейсах Понсети может привести к повреждению планки и набоек. Набойки для замены предоставляются по требованию.
- Неподходящий размер: Просим сообщить нам в течение 7 дней с момента получения. Если изделие вернется без потери товарного вида, то предоставляется бесплатная замена нужного размера.
- Отказ от полученного изделия: Если вы не удовлетворены изделием и требуете возврата стоимости, нужно выполнить следующие условия: Изделие должно быть в состоянии нового, без потери товарного вида и без отметин, в первоначальной упаковке. Изделие должно быть возвращено в течение 30 дней с даты выставления счета.

## Исключения

Наши гарантийные обязательства и условия не могут быть переданы третьим лицам. Внесение любых изменений в конструкцию изделия, его применение не по назначению или с нарушением настоящей инструкции являются основаниями для отмены гарантии на изделие. Ортезы Понсети предназначены только для применения с планками Понсети, и наоборот. Если вы столкнетесь с проблемами, не предусмотренными настоящими условиями, просим обращаться в нашу компанию. Нестандартные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке.

### C-Pro Direct Ltd

7A Enterprise Way

Edenbridge, Kent, TN8 6HF, UK.

Тел: +44(0) 1732 860 158 Факс: +44(0) 845 280 7222

Email: [enquiries@c-prodirect.com](mailto:enquiries@c-prodirect.com)

[www.c-prodirect.com](http://www.c-prodirect.com)

**c-prodirect**  
Proud to support the Ponseti method